

Fiala Olio

# Holoil®

Dispositivo medico classe IIb  
Solo per uso cutaneo

## Destinazione d'uso

Il prodotto è un coadiuvante nella rigenerazione e riparazione tessutale cutanea in lesioni acute e croniche (lesioni o alterazioni cutanee superficiali o profonde di varia natura come herpes labialis, afte, ascessi, otite esterna, acne infetta, eczemi, orticaria, micosi, punture d'insetti, abrasioni, escoriazioni, pruriti intimi, emorroidi, fistole, ragadi, geloni, occhio di pernice, onicomicosi, tiloma, verruche, unghia incarnita, piede d'atleta, ustioni, ferite chirurgiche, lesioni vascolari anche diabetiche, lesioni con esposizione di derma e/o di tessuto osseo, radiodermiti, ulcere da pressione). Coadiuvante il trattamento post tatuaggio. Riduce il rischio di formazione del cheloide. Indicato per la gestione dei trapianti cutanei. Grazie alla sua azione protettiva tessutale e alle sue proprietà di controllo della carica batterica, favorisce la guarigione di lesioni cutanee infette di varia natura. Riduce la necessità di debridement chirurgico. Il dispositivo mantiene una corretta idratazione tessutale nella sede della lesione, evitando la formazione di escara e la macerazione perilesionale.

**Il prodotto contrasta la colonizzazione batterica dell'area trattata.** Dispositivo medico. Solo per uso cutaneo.

## Modalità di applicazione

FIALA OLIO 5ml

Pulire, se necessario, la ferita con acqua o fisiologica, applicare una piccolissima quantità di Holoil® anche più volte al giorno per i primi 2-3 gg, esercitando un leggero massaggio se necessario. Successivamente, diminuire le applicazioni giornaliere o applicare a giorni alterni, fino al totale risanamento della lesione.

## Limiti di impiego

Il dispositivo è inefficace su tessuto necrotico se l'ipossia tessutale è minore di 30 mmHg di O<sub>2</sub>.

## Controindicazioni

Nella zona trattata non usare pomate o disinfettanti di nessun tipo contemporaneamente all'utilizzo del prodotto.

L'utilizzo improprio delle formulazioni può determinare una ritardata o nulla rigenerazione e riparazione tessutale, impedendo il fisiologico processo di guarigione.

Nel caso si verifichi un'ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti è necessario interrompere il trattamento e istituire una terapia idonea.

L'applicazione del dispositivo, in qualsiasi sua formulazione, potrebbe fare insorgere una temporanea sensazione di bruciore, prurito o rossore intorno alla zona lesionata, a vantaggio di una progressiva rivascularizzazione della lesione.

## Avvertenze

- Consente in molti casi di non fare terapia antibiotica locale e/o di accorciare la terapia antibiotica sistemica.
- Evitare l'utilizzo di disinfettanti perché intervengono negativamente sul processo di rigenerazione e riparazione tessutale.
- Il prodotto teme l'aria e la luce. Esporlo all'aria solo il tempo necessario richiudendo bene il contenitore dopo il suo utilizzo.
- Conservare a temperatura ambiente (20°/ 25°C). A temperature inferiori a 17°C, il dispositivo nella formulazione oleosa tende a solidificarsi, ma appena applicato sulla pelle, fluidifica immediatamente, senza alterare i principi attivi.
- Il prodotto, composto da sostanze naturali di origine vegetale, non è pericoloso per la salute e l'ambiente. Potrebbero insorgere allergie anche se fino ad ora mai rilevate.
- Non ingerire.
- Il dispositivo non è stato sperimentato clinicamente sulle ustioni di 2° e 3° grado.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
- La formulazione oleosa deve essere agitata bene prima dell'uso.
- Data la presenza di Olio di Neem, si sconsiglia l'uso del prodotto in caso di desiderio di concepimento.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com - email:info@rimos.com

CE 0476



Non disperdere nell'ambiente



RI.MOS. srl Mirandola (MO) Tel.+39 0535 25755 Fax +39 0535 25509



Fiala Olio

# Holoil®

Dispositivo medico classe IIb  
Solo per uso cutaneo

## Principi attivi

Azadiractina - Iperforina

NON CONTIENE PARABENI E PETROLATI

INCI della formulazione oleosa Fiala 5ml 

Componenti: Melia Azadirachta Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower Extract.

Rev. 12 di Giugno 2018

La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

 NUMERO DI LOTTO	 CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 MATERIALE RICICLATO E/O RICICLABILE	 DOPO L'USO NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUO' ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 QUANTITA' STIMATA	 FABBRICANTE	 DOPO L'APERTURA NON UTILIZZARE DOPO I MESI INDICATI

COD.INT. ISTHOL5



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

www.rimos.com - email:info@rimos.com

CE 0476



Non disperdere nell'ambiente