
MANIGLIONE A VENTOSA

REF 28972 - 28973 - 28974

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: *Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.*





- Il maniglione a ventosa non è progettato per sostenere o supportare tutto il peso corporeo.

- Il maniglione è stato progettato per assistere nei movimenti naturali quando si entra o si esce dalla doccia. Non sollecitare con strappi o altri movimenti impropri.

- Controllare sempre la tenuta e lo stato della ventosa attraverso l'apposita finestra, ogni volta prima dell'utilizzo.

- Non installare su superfici mobili.


- Portata massima: 60 kg (verticale); 45 kg (laterale).

- Solo per il codice prodotto 28974 - Portata massima: 85 kg (verticale); 60 kg (laterale)



Il costruttore non risponde di eventuali danni a persone o cose qualora il prodotto venga utilizzato per un uso non conforme o per usi non corretti o imprudenti.

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente su superfici lisce e non porose; su piastrelle, porcellana o fibra di vetro. Non installare su pannelli, legno o superfici verniciate o tappezzate.

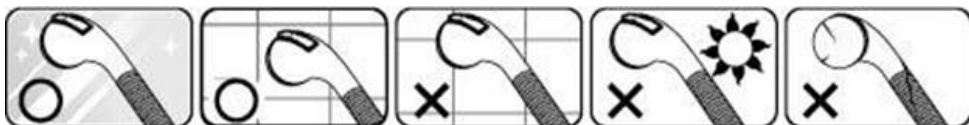

MONTAGGIO

1. Pulire accuratamente la superficie con una salviettina imbevuta d'alcool, attendere che la superficie sia asciutta. Controllare lo stato della ventosa. Non utilizzare in caso il dispositivo risulti danneggiato, incrinato o presenti fessurazioni.
2. Sollevare entrambe le leve, posizionare il maniglione a ventosa in modo che entrambe le ventose poggino saldamente e completamente su una superficie liscia.
3. Impugnare un'estremità e spingere la leva con il palmo della mano. Si dovrebbe percepire una leggera resistenza quando la ventosa aderisce alla superficie.




SMONTAGGIO

1. Sollevare entrambe le leve.
2. Se persiste l'aderenza, sollevare delicatamente un'estremità con un dito.
3. Non utilizzare uno strumento appuntito poiché potrebbe danneggiare la ventosa.
4. Mantenere entrambe le leve sollevate fino all'utilizzo successivo.

INDICATORE MONTAGGIO VENTOSA BREVETTATO

“VERDE” significa montaggio corretto, in caso contrario, la finestra diventerà di colore „ROSSO“. Il rosso indica la necessità di controllare la superficie e rimontare il dispositivo. Non posizionare in prossimità di giunture o fessure.

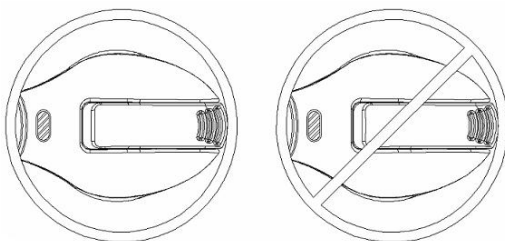

“VERDE” = OK

“ROSSO” = RIMONTARE

CONDIZIONI DI GARANZIA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.

La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

Non si risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente verranno respinte.