

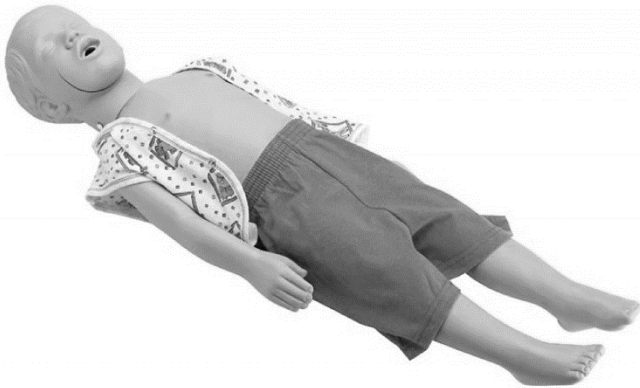
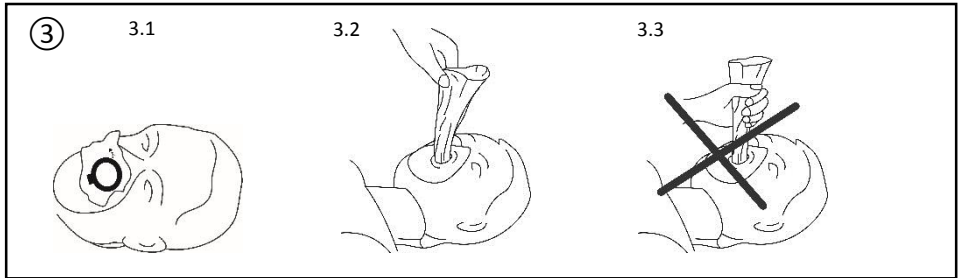


Istruzioni per l'uso

Ambu Junior

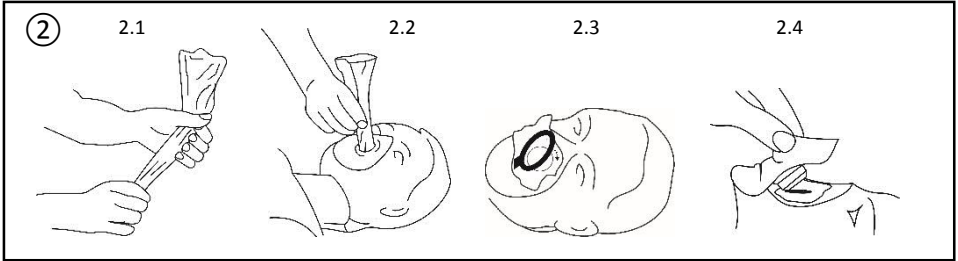

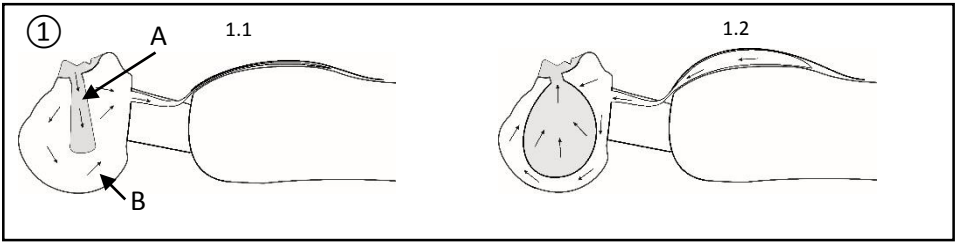

ITALIANO

1. Introduzione

Ambu Junior è un manichino per istruzione e addestramento che simula in modo realistico le condizioni del paziente durante la rianimazione cardiopolmonare mediante respirazione assistita e compressione toracica.

Del manichino fa parte un sistema igienico originale e brevettato, grazie al quale ognuno dei partecipanti ha il proprio pezzo facciale ed il proprio sacchetto d'insufflazione, riducendo così al minimo il rischio di contaminazione incrociata tra i partecipanti.

Grazie allo speciale sistema igienico non è necessario smontare il manichino per pulirlo e disinfettarlo internamente, né durante né dopo l'addestramento.

Ambu Junior riproduce le dimensioni di un adulto normale e fornisce una rappresentazione estremamente fedele dell'anatomia umana, specialmente per quelle caratteristiche che interessano direttamente l'addestramento alle moderne tecniche di rianimazione.

2. Sistema igienico ①

Schema di principio:

Il sacchetto d'insufflazione è montato sul capo ed il pezzo facciale è collocato al suo posto.

La ventilazione e appena stata avviata, vedere (1.1).

A: aria di un partecipante **B:** aria ambiente

La ventilazione è terminata e l'espirazione è appena cominciata, vedere (1.2).

NOTA: nel caso che vi siano perdite intorno alla maschera o difficoltà d'insufflazione, ciò è dovuto normalmente al posizionamento non corretto nel sollevamento del mento oppure all'insufficiente iperestensione del capo. Per soddisfare le condizioni d'uso del sistema igienico e per ottenere la necessaria tenuta stagna e misurazioni accurate, si dovrà utilizzare sempre un sacchetto d'insufflazione.

Tutti i partecipanti dovranno usare il proprio pezzo facciale ed il proprio sacchetto d'insufflazione esclusivamente durante l'addestramento.

3. Preparazione all'addestramento

Montaggio del sacchetto d'insufflazione e del pezzo facciale ②

Dispiegare il sacchetto d'insufflazione e tenerlo come mostrato, vedere 2.1. Facendo presa sull'anello del sacchetto, ripiegarlo come mostrato nelle relative immagini, vedere 2.2 e 2.3. Posizionare il pezzo bocca/naso nell'apertura della testa e premere contro la testa per ottenere un sicuro sigillo (2.4).

NOTA: non torcere la sacca mentre si piega, questo potrebbe causare un considerevole incremento nella resistenza all'insufflazione e espirazione.

Rimozione del pezzo facciale e della sacca d'insufflazione ③

Tirare il pezzo faccia verso di sé. Rimuovere delicatamente l'anello (3.1). Rimuovere la sacca facciale lentamente verso l'alto (3.2). Non chiudere la sacca facciale con la mano (3.3), poiché renderebbe quasi impossibile la rimozione della sacca.

4. Pulizia e disinfezione

Seguire la seguente procedura:

1. Pulire con acqua e poco detergente.
2. Risciacquare accuratamente in acqua pulita per eliminare tutti i residui di detergente.
3. Disinfettare seguendo i protocolli locali.

Ambu S.R.L.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
20864 Agrate Brianza
Italia
Tel. +39 039 657811
Fax. +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

**Manufactured by:
Simulaids, Inc.**

PO Box 1289
16 Simulaids Drive
Saugerties, NY 12477
USA