


ELETTRODI

Elettrodo autoadesivo per stimolazione elettrica

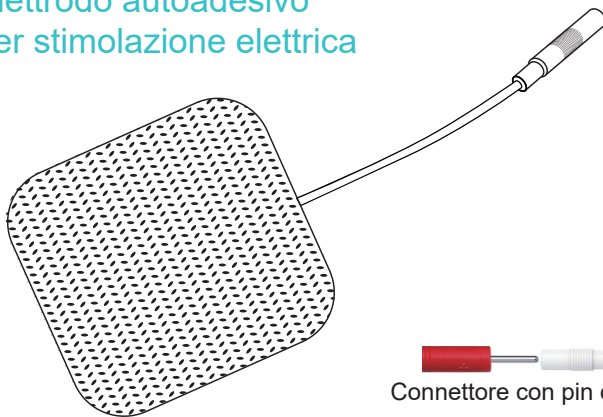

Connettore con pin da 2 mm

Uso previsto

L'elettrodo autoadesivo è destinato a essere utilizzato come interfaccia adesiva conduttiva riutilizzabile tra la pelle del paziente e gli stimolatori elettrici in commercio, ad es. TENS (Stimolazione Elettrica Transcutanea Nervosa), EMS (Stimolazione Elettrica Muscolare), IF o OFC (Corrente Interferenziale) o PGF (Stimolazione Galvanica Pulsata) per la trasmissione di corrente elettrica, per l'uso da banco o su prescrizione



Istruzioni per l'uso

Applicazione

1. Pulire accuratamente la pelle prima di ogni applicazione degli elettrodi. Gli elettrodi non aderiscono bene se sulla pelle sono presenti lozioni, oli, trucco, sporcizia, ecc.
2. Spegnerlo lo stimolatore prima di applicare gli elettrodi sulla pelle.
3. Inserire i terminali del filo conduttore del dispositivo nei connettori del filo dell'elettrodo.
4. Rimuovere gli elettrodi dal rivestimento protettivo e applicarli saldamente sulla pelle.

Rimozione


1. Spegnerlo lo stimolatore prima di rimuovere gli elettrodi dalla pelle.
2. Sollevando un angolo dell'elettrodo, rimuovere l'elettrodo dal rivestimento protettivo e staccarlo. Non staccare l'elettrodo dal filo.
3. Posizionare gli elettrodi sulla guaina e scollegare il filo conduttore ruotando e tirando i connettori del filo dell'elettrodo.

Cura e conservazione

1. Tra un utilizzo e l'altro, conservare gli elettrodi nella busta richiudibile in un luogo fresco e asciutto.
2. La durata degli elettrodi varia a seconda delle condizioni della pelle, della conservazione, della quantità di utilizzo, del tipo di stimolazione e del sito di stimolazione. La durata degli elettrodi può essere prolungata seguendo attentamente le istruzioni di applicazione riportate sopra e sotto.
3. Evitare che gli elettrodi siano esposti alla luce solare diretta o all'umidità eccessiva. Condizioni di conservazione consigliate: 5°C-27°C, umidità relativa: 40%-70%.
4. NON lasciare gli elettrodi scoperti all'aria per non compromettere la viscosità e le prestazioni del prodotto.

Attenzione

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
2. Gli elettrodi sono destinati esclusivamente all'uso da parte di un singolo paziente.
3. NON applicare sulla pelle lesionata. In caso di eruzione cutanea, interrompere l'uso e contattare il medico. NON utilizzare durante la guida di veicoli o l'utilizzo di macchinari.
4. NON smontare o modificare gli elettrodi.
5. Da utilizzare esclusivamente con dispositivi di stimolazione elettrica.
6. NON usare su bambini o neonati. Gli elettrodi non sono stati sottoposti a valutazione per l'uso pediatrico.

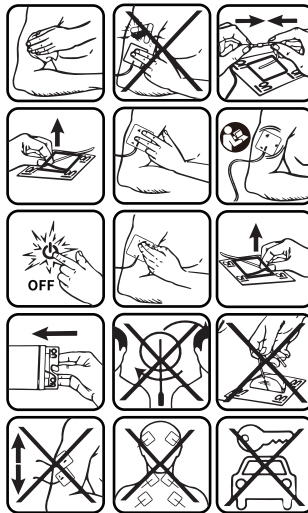

SENZA
LATTICE

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



LOT



Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.
202,2/F, Building 27, Dafa Industrial park, Longxi
Community, Longgang District, Shenzhen, China
Made in China