
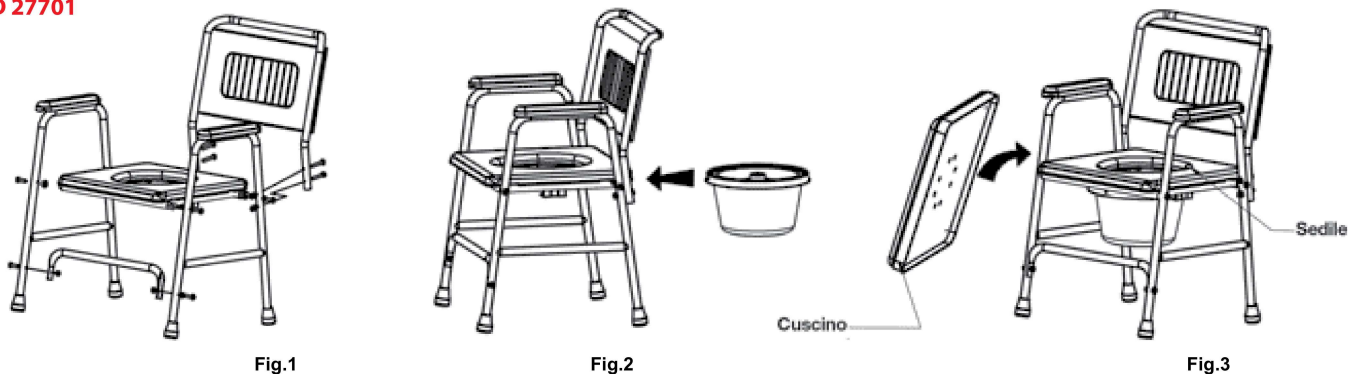


È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

 Avete acquistato un ausilio destinato ad agevolare l'utenza disabile. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta e non salire mai in piedi, per il montaggio fare riferimento alle immagini esplicative sotto.


COD 27701



Istruzioni di montaggio

Fig. 1. Aprire la confezione e assemblare la sedia come indicato in figura. Fissare con viti e bulloni.
 Fig. 2. Inserire la bacinella wc nel verso indicato dalla freccia.
 Fig. 3. Dopo l'utilizzo coprire con l'apposito cuscino.

COD 27702 - 27703

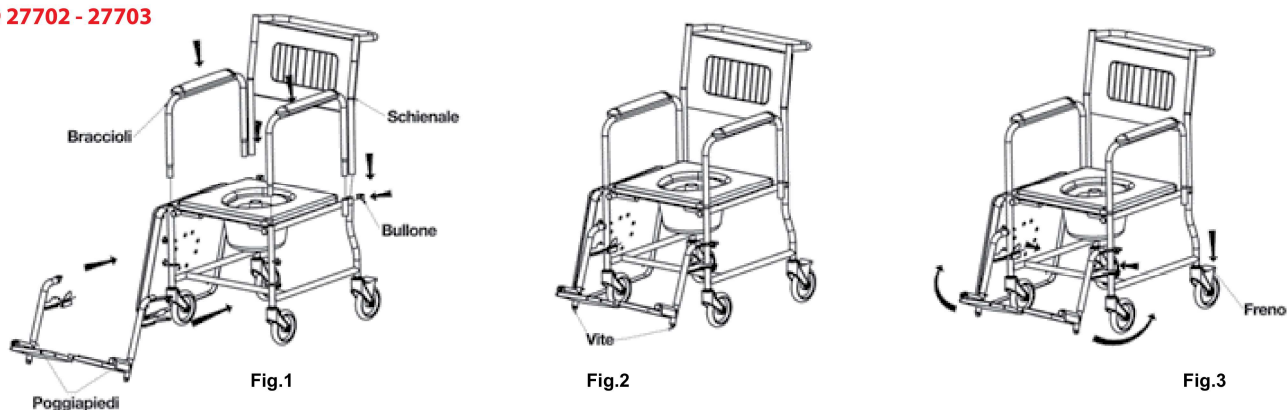

Istruzioni di montaggio

Fig. 1. Aprire la confezione e inserire i bracciuoli e i poggiapiedi e lo schienale sul corpo principale del telaio. Fissare lo schienale con il bullone.
 Fig. 2. Regolare l'altezza del poggiapiedi tramite la vite in base alle necessità dell'utente e quindi serrare la vite.
 Fig. 3. Prima dell'uso, premere verso il basso il freno delle ruote. Ruotare il poggiapiedi fino a quando il poggiapiedi non si blocca.

Sicurezza e manutenzione

1. Prima dell'uso, verificare che tutte le viti siano serrate e che il telaio principale sia stabile. La portata massima è di 100 kg.
2. Riporre in un locale ventilato.
3. Verificare che i puntali siano in buone condizioni. Nel caso sostituirli immediatamente se usurati o mancanti.
4. Aggiungere regolarmente l'olio lubrificante alle giunzioni.

Pulizia


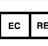
Utilizzare sempre un panno umido con detersivi neutri. Non immergere completamente il sedile in acqua. Dopo ogni utilizzo asciugare accuratamente le parti. Non utilizzare detersivi abrasivi in polvere o a base di candeggina.

Condizioni di esercizio

Temperatura: 5 ÷ 38°C
 Percentuale umidità: 20÷ 90%
 Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

Condizioni di conservazione e trasporto

Temperatura: - 10°C ÷ 50°C
 Percentuale umidità: 20÷ 90%
 Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

	Conservare in luogo fresco ed asciutto	REF	Codice prodotto
	Conservare al riparo dalla luce solare	LOT	Numero di lotto
	Leggere le istruzioni per l'uso	MD	Dispositivo medico
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Data di fabbricazione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		

CODICE 27701 - 27702 - 27703



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China



FS893 - FS691 - FS691S

