

**BOSTON** PVS SpA - Segrate -I-

**LOT** 201107 | CE

**Stecca per frattura-attelle-schienen-splint-tabla para fractura**

I La stecca per fratture **BOSTON** è resistente e leggera . Date le sue dimensioni si adatta molto bene per fratture agli arti superiori ed inferiori. Stampate sulla stecca sono illustrate diverse modalità di impiego. E trasparente ai raggi X , lavabile e disinfettabile, rivestita di materiale atossico. La stecca **BOSTON** può essere riutilizzata più volte, purché siano rispettate le regole di pulizia , manutenzione e conservazione indicate. Per sicurezza , si consiglia di non utilizzare la stecca se è venuta a contatto con liquidi corporei ed in particolare il sangue. Conservare in luogo asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi solari. Proteggere con un involucro se si pensa di riutilizzare la stecca. Lavare con acqua o liquido battericida ed asciugare