

GERMOCID POLVERE

DISINFETTANTE STERILIZZANTE A FREDDO

DISPOSITIVO MEDICO CE 0546**COMPOSIZIONE:****100 grammi di prodotto contengono:**

Tetracetilendiammina.....g.	25,000
Sodio Percarbonato.....g.	42,000
Coformulanti q.b. a..... g.	100,000

ASPETTO:

Polvere fine bianca.

ODORE:

Caratteristico

ATTIVITA':

GERMOCID POLVERE è uno sterilizzante a freddo: l'acido peracetico che si forma dalla reazione dell'acqua ossigenata (che si ottiene dopo dissoluzione del prodotto in acqua) e tetracetilendiammina esplica una efficace attività biocida nei confronti di spore, virus (HIV,HBV,HCV), batteri, micobatteri e funghi.

Alle concentrazioni indicate esercita l'azione sterilizzante dopo un tempo di 10 minuti di contatto.

Il prodotto è attivo dopo 15 minuti dalla dissoluzione, la soluzione così preparata è attiva per un tempo massimo di 24 ore.

Dai tests effettuati si dimostra che il prodotto è efficace anche in presenza di materiale organico, ma è buona norma immergere i dispositivi previamente detersi con apposito detergente, meglio se a base enzimatica.

INDICAZIONI**D'USO:**

GERMOCID POLVERE per le sue caratteristiche è indicato per una sterilizzazione e/o disinfezione rapida a freddo di: endoscopi, fibre ottiche, strumenti chirurgici e odontoiatrici, compresi i circuiti interni dei riuniti,trasduttori, ecc. Può essere utilizzato anche con lava endoscopi automatici ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- 1) Preparare la quantità d'acqua potabile (di rubinetto) tiepida nella apposita vaschetta, controllare che la temperatura sia intorno a 35 °C.
- 2) Versare (con l'apposito misurino dosatore) circa gr 16 di polvere per litro d'acqua
- 3) Mescolare la soluzione fino ad ottenere una soluzione limpida di colore blu chiaro.
- 4) Attendere 15 minuti prima di usare la soluzione
- 5) Per la sterilizzazione e decontaminazione immergere gli strumenti nella soluzione di GERMOCID POLVERE per almeno 10 minuti.
- 6) Rimuovere dagli strumenti lo sporco grossolano con

- prelavaggio utilizzando un detergente appropriato.
- 7) Per una sterilizzazione finale immergere di nuovo gli strumenti nella soluzione per almeno 10 minuti
 - 8) Rimuovere gli strumenti e risciacquare con acqua potabile.
 - 9) Per la conservazione asettica usare un prodotto appropriato

**VALIDITA' E
CONSERVAZIONE:**

Il prodotto ha una validità 2 anni dalla data di preparazione se conservato nella confezione integra sigillata.

TOSSICITA':

GERMOCID POLVERE alla concentrazione d'uso non presenta alcuna controindicazione per la persona e l'ambiente. L'agente attivo "acido peracetico" se ingerito, è solo moderatamente tossico (acido peracetico DL 50 = 1540 mg/kg). GERMOCID POLVERE alla concentrazione d'uso non presenta alcuna controindicazione per la persona e l'ambiente. La polvere può essere irritante per gli occhi: In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Alle normali concentrazioni operative non ha effetti corrosivi o irritanti sulla cute.

**IMPATTO
AMBIENTALE:**

Il residuo a contatto con le acque di scarico, si degrada immediatamente in acido acetico, acqua e ossigeno, agenti non considerati nocivi o inquinanti per l'ambiente. Pertanto le soluzioni d'impiego esauste non necessitano trattamenti particolari per lo smaltimento e possono essere riversate tranquillamente nella rete fognaria.

AVVERTENZE:



NOCIVO

FRASI R:

- R22: Nocivo per ingestione
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

FRASI S:

- S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S 22 Non respirare la polvere.
S 25 Evitare il contatto con gli occhi
S 26 in caso di contatto con gli occhi sciacquare subito ed interpellare immediatamente il medico.
S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

Contiene Sodio Percarbonato

Non usare per strumenti in lega di Alluminio e Nichel

AUTORIZZAZIONE:

Dispositivo Medico classe II b CE 0546 secondo direttiva CEE 93/42, come emendata dalla direttiva 2007/47/CEE

CONFEZIONI:

Barattolo da 500 g in scatole da 2 pezzi.
Dimensioni scatola: 223x113x154
Bancale da 180 scatole (6 strati da 30 scatole)
TIFF CODE: 08009110030046
CODICE PRODOTTO B750SE

CONSERVAZIONE:

Conservare nella confezione integra in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore Il prodotto teme l'umidità.

FABBRICANTE:

Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (Mi) – tel 02.66301938 – fax 02.66301939
www.germo.it info@germodis.com